



**AKTION vom 01.09. bis 31.12.2025**

# NSK Osseo 100/Osseo 100+

## Vorteile des Osseointegrations-Messgerät:

Das eigenständige Messgerät führt die ISQ-Messung schnell und unkompliziert aus. Das Ergebnis der Messung wird als numerischer Wert auf dem LED-Display angezeigt und gibt sofortigen Aufschluss über die Osseointegration eines Implantats.



### Osseo 100

REF : Y1004175

#### Inhalt:

- Osseo 100
  - MultiPeg Werkzeug
  - Netzadapter und Stecker
- statt € 2.380,00

**Witt-Aktions-Preis € 1.483,00**

### Osseo 100+

**Bluetooth®-Variante (Surgic Pro2-Anbindung)**

REF : Y1004176

#### Inhalt:

- Osseo 100+
  - MultiPeg Werkzeug
  - Netzadapter und Stecker
- statt € 2.734,00

**Witt-Aktions-Preis € 1.658,00**



#### Wiederverwendbarer MultiPeg™

- Erhältlich für alle gängigen Implantantsysteme<sup>1)</sup>
- Gewebefreundliches, haltbares Titan
- Ca. 20 Mal autoklavierbar
- Optimale Plattformanpassung
- ISQ Standard Calibrated

1. Der MultiPeg™ wird mit dem Implantat verbunden. Er lässt sich mühelos in das Innengewinde des Implantats einschrauben. (Drehmoment ca. 6-8 Ncm)
2. Richten Sie Osseo 100 einfach auf den Magnet an der Oberseite des MultiPeg. Nicht-invasiv, objektiv, genau und wiederholbar. Der Peg wird durch Magnetimpulse aktiviert und vibriert aufgrund der Steifigkeit im Kontaktbereich zwischen dem Knochen und der Oberfläche des Implantats.
3. Es wird ein ISQ-Wert erzeugt und auf dem Display angezeigt. Dieser steht für den Grad der Stabilität auf der universellen ISQ-Skala - zwischen 1 und 99. Je höher der ISQ-Wert, desto stabiler das Implantat.

Bitte wählen Sie das zu Ihrem Implantat passende MultiPeg aus dem MultiPeg-Sortiment aus....

Bitte tragen Sie Ihren Auftrag ein und senden diesen an  
Fax-Nr.: +49 7732 9828-28 oder [info@witt-dental.de](mailto:info@witt-dental.de)

**Osseo 100**  
zum Witt-Aktions-Preis von € **1.483,00**

**Osseo 100+**  
zum Witt-Aktions-Preis von € **1.658,00**

**Osseo MultiPeg**  
zum Witt-Aktions-Preis von € **39,00**

**Bitte nennen Sie uns aus dem MultiPeg-Sortiment**

Anzahl  Nummer  Type

Ansprechpartner:

Datum:

Praxisstempel: